


## OPCIONES DE DISPOSITIVOS PRECICE®

La línea de productos PRECICE cuenta con opciones tanto para el fémur como para la tibia. El sistema ofrece varias opciones de configuración y de tamaño que permiten ajustarlo mejor a las características anatómicas específicas del paciente.

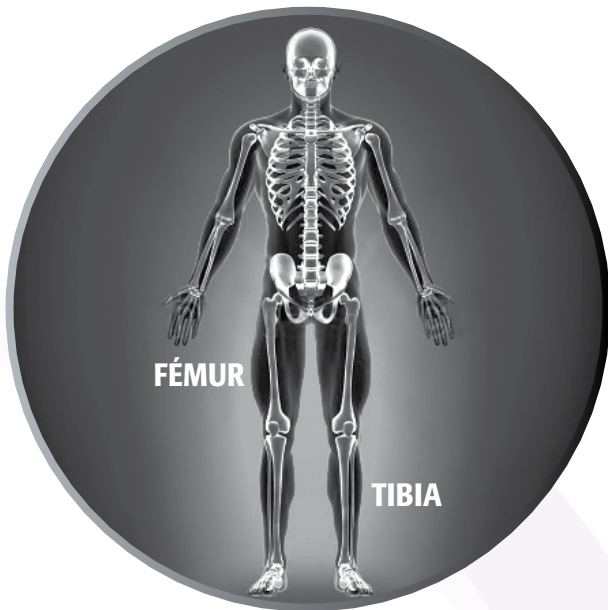

## SISTEMA INTRAMEDULAR DE ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES PRECICE

- Aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para el alargamiento del fémur y la tibia.
- Eficaz con solo siete minutos al día.
- Presenta tecnología punta con control remoto.
- No se necesita fijación externa en la mayoría de los pacientes.



Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su representante de ventas local.

📍 101 Enterprise, Suite 100 | Aliso Viejo, California 92656  
Teléfono: (+1) 949-837-3600  
Fax: (+1) 949-837-3664

🇳🇱 Maastrichterlaan 127 - 129 – Países Bajos 6291 EN Vaals  
Teléfono: (+31) 43-306-3320  
Fax: (+31) 43-306-3338

CE 0297

©2017. NuVasive, Inc. Reservados todos los derechos. NuVasive y NuVasive son marcas registradas de NuVasive, Inc. PRECICE es una marca registrada de NuVasive Specialized Orthopedics en los Estados Unidos y puede estar registrada en otros países. NuVasive Specialized Orthopedics es una marca comercial de NuVasive, Inc.

Rx Only.

El sistema intramedular de alargamiento de extremidades PRECICE® consiste en un clavo intramedular implantable, tornillos de fijación, instrumentos reutilizables y un control remoto externo de mano. El clavo PRECICE es un dispositivo estéril de un solo uso que se implanta quirúrgicamente con ayuda de los instrumentos y los tornillos de fijación. Después de la implantación, el control remoto externo se utiliza a diario para alargar o acortar de forma atraumática el implante a la longitud prescrita. El sistema PRECICE está diseñado para alargar el fémur y la tibia. Las contraindicaciones incluyen infección o condiciones patológicas óseas tales como osteopenia, que dificultarían la sujeción firme del dispositivo; alergias y sensibilidad al metal; pacientes con una distancia entre la superficie de la extremidad tratada y el canal intramedular de más de 51 mm en el caso de los implantes de 10,7 y 12,5 mm de diámetro, o de más de 38 mm en el caso del implante de 8,5 mm de diámetro; pacientes con un diámetro óseo irregular que impediría la inserción del clavo PRECICE; pacientes en quienes el clavo PRECICE atravesaría espacios articulares o abriría placas epifisarias de crecimiento; pacientes que tienen un canal medular obliterado u otras afecciones que tienden a retrasar la consolidación, por ejemplo, riego sanguíneo limitado, vasculopatía periférica o indicios de vascularidad inadecuada; pacientes no dispuestos o incapaces de seguir las instrucciones para el cuidado postoperatorio; pacientes que pesen más de 114 kg para los implantes de 10,7 y 12,5 mm de diámetro (modelos A-G, H, J, K y U), y más de 57 kg para los implantes de 8,5 y 10,7 mm de diámetro (modelos A-G, H, J, K, U, N, M, P y Q). Solo médicos titulados y con formación pueden utilizar el dispositivo implantable. Consulte la información importante de seguridad completa en las instrucciones de uso del Sistema intramedular de alargamiento de extremidades PRECICE.

**Advertencia: Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.**

# PRECICE®

ADJUSTABLE SOLUTIONS  
FOR ORTHOPEDICS



Una opción de tratamiento  
revolucionaria para pacientes con  
discrepancia de longitud de las  
extremidades

## Soluciones ortopédicas ajustables


### SI SE LE VA A ALARGAR UNA DE SUS EXTREMIDADES, NO ESTÁ SOLO.

Cada año se llevan a cabo miles de procedimientos de alargamiento de fémur y de tibia.



### ¿QUÉ ES EL SISTEMA INTRAMEDULAR DE ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES PRECICE®?

PRECICE es un dispositivo interno para el alargamiento de las extremidades que puede ajustarse mediante control remoto externo. Este avance en tecnología atraumática permite a su médico personalizar el tratamiento según sus necesidades particulares.

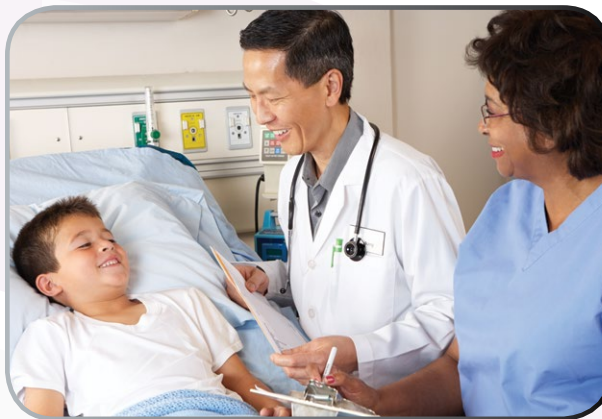

### ¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A GARANTIZAR UN RESULTADO EXCELENTE?

- Hasta que su médico se lo indique, no camine ni participe en actividades en las que tenga que apoyar más del 20 % de su peso corporal sobre la pierna con el implante.
- Tome todas las vitaminas y los medicamentos que le recete su médico.
- Para obtener más información, consulte siempre el Folleto de información e instrucciones para pacientes que le dé su médico. Debe leer este folleto en su totalidad antes de usar el control remoto externo.

### ¿QUÉ ES EL CONTROL REMOTO EXTERNO?

El control remoto externo es la clave para ajustar el implante PRECICE de forma atraumática. Su médico o el personal de su consulta programa el control remoto externo según sus necesidades de alargamiento particulares. La programación personalizable del control remoto externo permite que las sesiones de alargamiento se lleven a cabo en la comodidad de su domicilio.

### USO DEL CONTROL REMOTO EXTERNO

- Siga siempre las instrucciones del médico.
- Coloque el mando del control remoto externo sobre la piel, directamente encima del clavo implantado.
- Las flechas del mando del control remoto externo siempre deben apuntar a sus pies.
- No utilice el control remoto externo a menos de 60 cm de objetos metálicos sueltos, ya que los imanes del control los atraerán.

